



INTERNATIONAL
FEDERATION
for
SPINA BIFIDA
and
HYDROCEPHALUS

Nettoyage et stockage des sondes, seringues et cônes

Manuel d'utilisation pour les infirmières

© Fédération Internationale pour le Spina Bifida et l'Hydrocéphalie

Dernière révision: Août 2012

1) *Nettoyage et stockage de la sonde et de la seringue*

- Laver l'extérieur de la sonde avec de l'eau
- Rincer 3 fois la sonde avec de l'eau et appliquer de l'air pour enlever l'excès d'eau
- Sécher la sonde le plus possible en la secouant, la laisser sécher au soleil si possible et la conserver dans une cuvette propre ou dans un morceau de tissu propre. Repasser le tissu au préalable
- Seringue : la laver avec de l'eau, la purger avec de l'air et stocker les différentes parties séparées
- Les sondes doivent être remplacées tous les 3 mois




2) *Matériel d'irrigation colique: cône + flacon + tube*

Un bon entretien du matériel d'irrigation en prolonge la durée de vie et évite les infections.

➤ Le matériel d'irrigation colique consiste en :



Cône

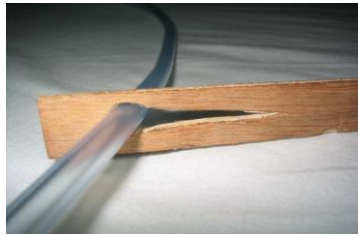

Tube avec pince



Ensemble complet avec réservoir

1. Nettoyage après chaque utilisation :

- Nettoyer toutes les parties de l'ensemble après chaque utilisation: laver avec de l'eau et du savon et rincer plusieurs fois à l'eau
- Laisser sécher complètement toutes les parties

2. Nettoyage périodique :

- Pour éviter les champignons, il est conseillé de nettoyer les ensembles de manière plus approfondie chaque mois
- Utiliser une solution d'eau de javel/chlore
- Rincer à l'eau propre et laisser sécher complètement