



INTERNATIONAL
FEDERATION
for
SPINA BIFIDA
and
HYDROCEPHALUS

*Consultative
status special
category with the
Economic and Social
Council of the United
Nations, Participatory
status, Council of
Europe*

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE LOS CATETERES, JERINGAS Y CONOS

Guía de trabajo para enfermeras

© International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus

Last revision: December 2010

1) LIMPIAR Y GUARDAR EL CATETER Y JERINGA

- Lave el exterior del catéter con agua
- Enjuague el catéter 3 veces con agua. Soplarlo para eliminar el exceso de agua
- Agite el catéter para que quede lo más seco posible
- Deje que se seque al sol si fuera posible y guárdelo entre un pedazo de gasa limpia.
- Los catéteres deben ser reemplazados cada tres meses.




2) EQUIPO PARA LAVAR EL INTESTINO: CONO + BOLSA + TUBO

Un buen mantenimiento del juego de lavado prolonga la vida útil del material y evita infecciones

- Un juego de lavado intestinal se compone de:



Cono

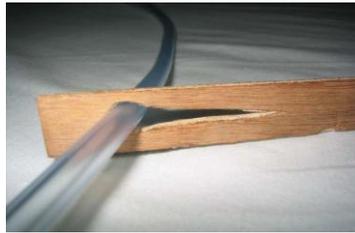

Tubo con pinzas



juego completo con depósito

1- Limpieza después de cada uso

- Limpiar todas las piezas del juego después de cada uso: lavar con agua y jabón y enjuagar con agua varias veces
- Dejar que se sequen completamente todas las partes

2- Limpieza periódica

- > Para evitar los hongos, se recomienda limpiar los juegos más a fondo todos los meses
- > Utilizar una solución de agua con lejía/cloro/ lavandina
- > Enjuagar con agua limpia y dejar secar por completo